

Procto-Zac Silver, krem proktologiczny z aplikatorem, 25 ml



Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	25 ml
Postać	krem
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Procto-Zac Silver, krem proktologiczny z kompleksem srebra TIAB, aplikatorem. Przynosi ulgę w bólu, świądzie i pieczeniu oraz w przypadku łagodnych zmian pooperacyjnych. Krem wspomaga naturalny proces gojenia kanału odbytu o odbytnicy.

Wyrób medyczny ma postać kremu na bazie kwasu hialuronowego, ekstraktu z Aloe vera i kompleksu TIAB.

Produkt ten izoluje obszar zajęty przez zewnętrzne mikroorganizmy, ogranicza kolonizację zewnętrznych czynników chorobotwórczych w miejscu stosowania, tworzy korzystne warunki do naturalnej regeneracji tkanki nawet po nieskomplikowanej operacji proktologicznej w mikrośrodowisku rany.

Zastosowanie

- Wspomaganie leczenia objawów związanych z hemoroidami.
- Wspomaganie i przyspieszanie naturalnych procesów regeneracji i gojenia w przypadku hemoroidów, szczelin odbytu lub urazów powstałych w wyniku leczenia chirurgicznego.

Sposób użycia

- Wewnętrznie (kanał odbytu) opakowanie z aplikatorem: Przed użyciem należy oczyścić i dokładnie wysuszyć miejsce aplikacji. Odkręcić nakrętkę tuby i drugą jej stroną przebić aluminiową membranę zabezpieczającą. Nakręcić aplikator w kształcie kaniuli na tubę w miejsce nakrętki. Delikatnie wsunąć aplikator do odbytu i wycisnąć odpowiednią ilość kremu, aby pokryć nim obszar dotknięty zmianami. Odkręcić aplikator. Umyć aplikator po użyciu. Dokładnie umyć ręce. Zamknąć tubkę nakrętką. - Zewnętrznie (okolice odbytu): Przed użyciem należy oczyścić i dokładnie osuszyć miejsce aplikacji. Odkręcić nakrętkę tubki i drugą jej stroną przebić aluminiową membranę zabezpieczającą (tylko przy pierwszym otwarciu). Wykonując delikatne masujące ruchy, należy nałożyć produkt bezpośrednio na obszar dotknięty zmianami (okolice odbytu). Po użyciu umyć ręce i dokładnie zamknąć tubkę nakrętką.

Zaleca się stosowanie produktu dwa razy dziennie i każdorazowo po wypróżnieniu lub częściej, jeśli to konieczne.

Skład

Woda, eter stearylowy olipropropyloglikolu 15, Steareth-2 (alkohol stearylowy oksyetylowany 2 molami tlenu etylenu), kwas stearynowy, gliceryna, molekula monowalencyjnych jonów srebra związana kowalencyjnie z mikrokryształami dwutlenku tytanu, alkohol cetearylowy, dimetykon, Steareth-21 (alkohol stearylowy oksyetylowany 21 molami tlenu etylenu), ekstrakt z Aloe barbadensis, etyloheksylogliceryna, hialuronian sodu, octan tokoferolu, chlorek benzalkoniowy, diizotonian heksamidyny, sól dwusodowa kwasu wersenowego, wodorotlenek sodu.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Pod wpływem promieni słonecznych zawartość tuby może ulec zabarwieniu na lekko żółty kolor. Nie wpływa to na działanie i charakterystykę produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produktu nie należy używać do celów innych niż wskazane w instrukcji użycia wyrobu;
- Przed nałożeniem produktu należy dokładnie umyć ręce;
- Po nałożeniu produktu nie należy masować zmienionego miejsca i pozwolić, aby produkt wchłonął się, tworząc ochronny film;
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu należy natychmiast przemyć je wodą;
- Nie używać produktu po dacie ważności wydrukowanej na opakowaniu;
- Jeden aplikator może być używany wyłącznie przez jedną osobę;
- Nie zamrażać;
- Trzymać z dala od dzieci;
- Do użytku miejscowego;
- Nie stosować doustnie;
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte;
- Po użyciu dokładnie zamknąć tubę;
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników;
- Zaprzestać stosowania w przypadku nietypowych reakcji skórnych;
- W przypadku krwawienia należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek preparatu; Przed rozpoczęciem stosowania tego preparatu w ciąży lub okresie karmienia, z uwagi na brak konkretnych danych dotyczących stosowania, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.