

Prontosan, roztwór do płukania ran, 1000 ml



Cena: 109,90 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|--------------------------|
| Opakowanie | 1 l |
| Postać | płyn |
| Producent | AESCLAP CHIFA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Opis

Prontosan to roztwór do oczyszczania i nawilżania ostrych i przewlekłych ran oraz ran poparzeniowych.

Działanie

Prontosan roztwór to unikalny produkt z kombinacją dwóch substancji aktywnych – poliheksanidyny i betainy. Dzięki połączeniu tych dwóch substancji preparat doskonale sprawdza się wspomagająco w leczeniu ran o różnej etiologii. Poliheksanidyna wykazuje działanie biobójcze, a betaina jest surfaktantem powierzchniowo czynnym, który umożliwia skuteczne oczyszczenie rany z zanieczyszczeń oraz biofilmu.

Zastosowanie

- Usuwanie biofilmu i zapobieganiu jego powstawania,
- Oczyszczanie i nawilżanie przewlekłych ran,
- Nawilżanie oraz uwalnianie zaschniętych opatrunków, takich jak okłady, gazy, wkładki, bandaże, gąbki, żele, hydrowłókna i opatrunki alginowe, hydrokoloidy itp.,
- Przemywanie błon śluzowych

Sposób użycia

- Wszystkie rany należy płukać i czyścić roztworem do płukania ran Prontosan tak, by występujące łatwe do usunięcia zaskorupiałe zanieczyszczenia rany zostały usunięte,
- Roztwór do płukania ran Prontosan można podgrzać do temperatury ciała tuż przed zastosowaniem,
- Roztwór można stosować w przypadku przylegających bandaży lub w sytuacji, gdy zmiana opatrunku jest utrudniona,

Skład

Sterylny roztwór wodny zawierający: 0,1 % poliheksanidynę i 0,1 % undecylenamidopropyl betainę.

Dodatkowe informacje

Okres ważności- 8 tygodni po pierwszym otwarciu.