

Protefix, krem mocujący do protez zębowych, extra mocny, 47 g

Cena: 17,99 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	47 g
Postać	krem do protez
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Protefix, krem mocujący Extra mocny to długotrwały komfort noszenia protez zębowych całkowitych i częściowych. Krem zapewnia silniejsze działanie. Działa natychmiastowo, także na wilgotnej protezie. Krem uszczelnia protezy przed drobinkami jedzenia. Chroni przed uciskiem protezy.

Zastosowanie

Krem mocujący do protez.

Sposób użycia

- Oczyszczyć protezę i na suchą lub wilgotną nałożyć krem mocujący.
- Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami).
- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Skład

Mieszanka soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej - przed zastosowaniem kremu należy skonsultować się z dentystą.

