

Protefix, krem mocujący Extra mocny, 2 x 47 g



Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	94 g
Postać	krem
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Protefix, krem mocujący Extra mocny to długotrwały komfort noszenia protez zębowych całkowitych i częściowych. Krem zapewnia silniejsze działanie. Działa natychmiastowo, także na wilgotnej protezie. Krem uszczelnia protezy przed drobinkami jedzenia. Chroni przed uciskiem protezy.

Zastosowanie

Krem mocujący do protez zębowych całkowitych i częściowych.

Sposób użycia

1. Oczyszczyć protezę i na suchą lub wilgotną nałożyć krem mocujący.
2. Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami).
3. Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
4. Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
5. Po użyciu starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Skład

Guma celulozowa 27%, sól wapniowo-sodowa kopolimeru PVM/MA 26%, ciekła parafina, wazelina, krzemionka, mentol, CI 14720, metyloparaben.

Przechowywanie

Chronić przed dostaniem się wilgoci do tubki.