

Protefix, krem mocujący Hypoalergiczny, 47 g



Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	47 g
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Protefix Krem mocujący hypoalergiczny nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji aromatycznych. Sprawdzi się u osób podatnych na reakcje uczuleniowe, gdyż zmniejsza ryzyko reakcji alergicznej. Jednocześnie zachowuje wszystkie właściwości mocujące oryginalnego kremu Protefix.

Stosowanie

- na wilgotną lub suchą protezę nałożyć krem mocujący, najpierw mniejszą ilość, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, i aby krem nie wypływał spod protezy,
- protezę założyć, przycisnąć i lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu,
- po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Składniki

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu.