

Protefix, krem mocujący, premium mocowanie, 47 g

Cena: 19,99 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	47 g
Producent	FARMACOL LOGISTYKA
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Protefix, krem mocujący, premium mocowanie. Zapewnia komfort przez cały dzień, uszczelnia przed przedostaniem się drobinek jedzenia. Chroni dziąsła dzięki witaminie E. Zapewnia długotrwały komfort dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową. Trzyma na mokro, można nanosić na mokrą protezę zębową dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową. Krem mocujący ma łagodny, świeży smak mięty.

Wskazania

Mocowanie protez zębowych.

Skład

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru, PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, wyciąg z rumianku pospolitego, octan tokoferylu, mirra, wyciąg z szałwii lekarskiej, mleczań mentylu, wyciągu z mięty, CI 14720.

Stosowanie

- Krem mocujący powinno się nakładać zgodnie z instrukcją gdyż przy nałożeniu nadmiernej ilości zmniejsza się skuteczność działania kremu.
- Dawka dobową: do 0,8 g kremu mocującego.
- Wyczyścić protezę zębową i błonę śluzową jamy ustnej z resztek pokarmu.
- Nałożyć krem na oczyszczoną, mokrą lub suchą protezę zębową w odstępach (krótkimi odcinkami)
- Założyć protezę zębową, docisnąć ją przez kilka sekund do szczęki lub żuchwy i lekko przygryźć. Odczekać 5 minut przed przyjmowaniem posiłku.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje

- Krem mocujący należy stosować tylko tymczasowo.
- Dostanie się wilgoci do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.
- Ewentualne resztki kremu mocującego można łatwo usunąć ze szczęki, żuchwy i podniebienia za pomocą wacika zwilżonego olejem jadalnym.
- Odpowiednie dopasowanie protezy należy regularnie poddawać kontroli.
- Należy dokładnie wycisnąć tubę przed użyciem aby uniknąć oddzielenia się oleju od kremu mocującego.

- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, dbając aby otwór tuby był czysty i suchy.