

Puwer Test ciążowy płytkowy, 1 sztuka



Cena: 4,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test ciążowy
Producent	PUWER POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Puwer Test ciążowy płytkowy to szybki i wygodny test ciążowy wykrywający obecność hormonu hCG w moczu już o stężeniu na poziomie 10 mIU/ml, dzięki czemu test można wykonać już w pierwszym tygodniu od spodziewanego momentu zapłodnienia. Wiarygodność testu wynosi 99%, a wynik otrzymujemy po 3-5 minutach, do użytku o każdej porze dnia.

Zastosowanie

Test ciążowy płytkowy.

Sposób użycia

- Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego pojemniczka.
- Wyjąć test z opakowania.
- Wypakować pipetę i test ciążowy, który należy położyć na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Zanurzyć końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu i pobrać próbkę.
- Umieścić w okienku testu 4 krople pobranego moczu i położyć test na płaskiej powierzchni.
- Odczekać 3 minuty, odczytać wynik. Pozytywny wynik widoczny jest już po 1 minucie.

Nie należy brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0123).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest płytka testowa, pipetka do pobrania próbki i instrukcja użycia w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

