

# Remo-Wax, krople do usuwania woskowiny usznej, 10 ml + gumowa gruszka



Cena: 22,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml + gumowa gruszka
Postać	krople do uszu, roztwór
Producent	ORION CORPORATION
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis

Remo-Wax, krople do usuwania woskowiny usznej. Zawiera naturalne, bezpieczne substancje, m.in. alantoinę i lanolinę. Preparat służy do zapobiegania powstawaniu korka woskowinowego, lub usuwania już powstałego poprzez rozpuszczanie woskowiny.

### Zastosowanie

Krople do usuwania woskowiny usznej.

### Sposób użycia

- **Rozpuszczanie korka woskowinowego:** ogrzać zawartość butelki z kroplami w dłoni do temperatury ok. 37°C, przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą w bok i zaaplikować do ucha 10-20 kropli, kilkakrotnie pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół, wykonując ruch obrotowy, można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax i pozostawić przez 20-60 minut (w razie potrzeby tampon można pozostawić w uchu na noc).
- **Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki:** gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem. Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała. Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie, powoli ściskając gruszkę. Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego. Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta. Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta.

### Skład

- Krople: Alantoina, lanolina etoksylogowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu nerek, alkohol feniloetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.
- Gruszka: polichlorek winylu (PVC).

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować tych kropli w przypadku: stanu zapalnego lub bólu ucha, wydzieliny z ucha, uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej), uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli.
- Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić kogoś o podanie tych kropli do przewodu słuchowego i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.
- W przypadku korzystania z aparatu słuchowego, należy go umieścić na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.