

## ReNu Multiplus, płyn do pielęgnacji soczewek, 360 ml



Cena: 30,59 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	360 ml
Postać	płyn
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis

ReNu Multiplus to wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych zapewniający nawilżenie i czystość. Odpowiedni dla każdego typu soczewek, w tym soczewek silikonowo-hydrożelowych. Płyn zawiera Hydranate - składnik usuwający osady białkowe, posiada również wysoką skuteczność bakteriobójczą przeciwko szerokiemu spektrum drobnoustrojów. Zawiera również Poloksaminę - usuwającą tłuszcze i zanieczyszczenia środowiskowe.

Dymed jest nietoksycznym dla tkanek oka środkiem dezynfekującym.

#### Sposób użycia

- Do prawidłowej dezynfekcji soczewki kontaktowej wystarczy wylać na każdą z jej stron 3 krople oraz pocierać ją delikatnie palcami przez około 20 sekund.
- Następnie spłukać obficie obie powierzchnie soczewki płynem ReNu przez co najmniej 5 sekund.
- Zanurzyć w świeżo wlanym płynie do pojemnika na co najmniej 4 godziny.
- Po ich wyjęciu należy wylać płyn i nie używać go ponownie.

#### Skład

Hydranate® (hydroksyalkilofosfonian) 0,03%, kwas borowy, sól dwusodowa kwasu etylenodwumioczterooctowego, poloksamina 1%, boran sodu, chlorek sodu, DYMED™ (biguanid poliaminopropylu) 0.00001% jako środek konserwujący.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ważna jest regularna wymiana pojemniczka na soczewki raz na 3 miesiące.
- Ważność płynu po otwarciu do 3 miesięcy.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
- Płyn posiada znak CE 0050, który informuje o spełnieniu wymogów Unii Europejskiej.
- Produkt posiada etykietę w języku polskim. Do produktu dodana jest również instrukcja obsługi w języku polskim.

