

Rotadeno-Screen, test diagnostyczny na rotawirusy i adenowirusy w kale, 1 sztuka



Cena: 54,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Rotadeno-Screen, jest szybkim testem immunodiagnostycznym do wykrywania antygenów rotawirusa oraz adenowirusa w kale za pomocą dwóch różnych pasków umieszczonych w tej samej kasecie. Test powinien być wykonany w przypadku infekcji żołądka i jelit, zapalenia układu pokarmowego, objawów takich jak: ostra biegunka, wymioty, gorączka, osłabienie. Test można wykonać o dowolnej porze dnia, gdy występuje wypróżnienie.

Sposób użycia

Pobranie próbki kału

- Dokładnie umyj ręce. Użyj mydła i ciepłej wody. Osusz ręce czystym ręcznikiem.
- Próbki kału muszą być pobrane przy użyciu dedykowanej papierowej podkładki zawartej w zestawie.
- Odkręć nakrętkę butelki do pobrania próbki i zanurz jej koniec w próbce kału (na głębokość około 2 cm). Próbkę należy pobrać w 3 różnych miejscach.
- Włóż nakrętkę z próbką kału do butelki zawierającej diluent (rozcieńczalnik). Zakręć nakrętkę mocno i dobrze wstrząśnij, aby rozpuścić próbkę kału w rozcieńczalniku.
- Usuń papierową podkładkę i zutylizuj ją w toalecie.

Wykonanie testu

- Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij urządzenie testowe. Wyrzuć saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.
- Złam końcówkę butelki zawierającej próbkę.
- Trzymaj butelkę pionowo i dodaj powoli dokładnie 5 kropli rozcieńczalnika (w odstępie 2-3 sekund między każdą kroplą) do każdego dołka próbkowego. Uwaga! Konieczne jest dodanie 5 kropli rozcieńczalnika do każdego dołka próbkowego, ponieważ w urządzeniu znajdują się 2 paski reaktywne, tj. jeden dla rotawirusa i drugi dla adenowirusa.
- Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut. Nie interpretuj wyniku testu po upływie 15 minut.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C.

Dodatkowe informacje

Opakowanie zawiera:

- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: 1 urządzenie testowe oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci,
- 1 papierowa podkładka do pobrania próbki kału,
- 1 butelka do pobrania próbki kału zawierająca 2 ml rozcieńczalnika,
- 1 ulotka z instrukcją użytkowania.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0483).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.