

# Sanity zakraplacz do oczu, 1 sztuka

Cena: 6,50 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Zakraplacz do oczu, przyrząd służy do przenoszenia i odmierzania płynów oraz ich bezpiecznego aplikowania do oka, nosa, ucha. Zakraplacz jest bezpieczny, precyzyjny i prosty w użyciu oraz higieniczny.

### Zastosowanie

Przyrząd do przenoszenia i odmierzania płynów oraz ich bezpiecznego aplikowania do oka, nosa, ucha.

### Sposób użycia

- Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem obie części zakraplacza należy rozdzielić i zanurzyć w całości w gotującej się wodzie na kilka minut,
- Ścisnij ssawkę i zanurzyć końcówkę zakraplacza w przygotowanym płynie, a następnie zassać go poprzez zwolnienie nacisku,

aplikować odpowiednią dawkę poprzez ściśnięcie balonika tak, aby ciecz wydawała się kroplami przez otwór na końcu rurki.

### Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

- Podczas zabiegu zachowaj bezpieczną odległość wyrobu od oka.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu rąk z końcówką zakraplacza.
- W razie uszkodzenia wyrobu należy go wyrzucić.
- Rodzaj zastosowanego roztworu/leku zawsze skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosuj środków dezynfekujących.