

Scholl Gelactiv, żelowy duży klin między palce, 1 sztuka



Cena: 21,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	klin
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Scholl Żelowy duży klin między palce rozdziela obolałe, zachodzące palce stóp, zmniejszając tarcie pomiędzy nimi, poprawia komfort chodzenia. Klin jest dyskretny, niewidoczny. Wielokrotnego użytku, może być myty.

Zastosowanie

Zachodzące na siebie palce.

Sposób użycia

- Umieścić pomiędzy palcami.
- Zdejmować na noc.
- Myć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Dokładnie wypłukać, pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować na popękana lub uszkodzoną skórę.
- Nie używać z innymi produktami do stóp.
- Natychmiast zaprzestać stosowanie jeśli wystąpi podrażnienie skóry w trakcie używania produktu.
- Diabetycy: przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

