

Scholl, spray do usuwania kurzajek i brodawek, 80 ml



Cena: 62,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	80 ml
Postać	spray
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Scholl, spray do usuwania kurzajek i brodawek, odpowiedni dla dzieci powyżej 4 roku życia i osób dorosłych. Oparty na metodzie zamrażania stosowanej przez lekarzy i specjalistów.

Zastosowanie

Spray do usuwania kurzajek i brodawek.

Sposób użycia

Przed użyciem należy uważnie przeczytać ulotkę. Przygotuj minutnik (np. kuchenny) do dokładnego mierzenia czasu gdyż należy przestrzegać czasu aplikacji, który jest ściśle określony by zachować bezpieczeństwo i skuteczność działania.

1. Zamontuj aplikator do białej plastikowej przykrywki, wciskając go do większego otworu zgodnie z rysunkiem.
2. Umieść puszkę z preparatem wylotem do góry na zabezpieczonym blacie stołu, bądź innej stabilnej i płaskiej powierzchni. Nie zbliżaj pojemnika do twarzy, innych części ciała bądź odzieży. Umieść białą, plastikową przykrywkę na puszcze zgodnie z rysunkiem, tak by aplikator znajdował się w przezroczystej plastikowej osłonie z boku pojemnika.
3. Trzymając puszkę w pozycji pionowej, jak na rysunku, naciśnij dozownik i przytrzymaj przez 5 sekund. Nie trzymaj pojemnika za plastikową osłonę.
4. Zdejmij plastikową przykrywkę z zamontowanym aplikatorem z puszki. Nie pozwól by płyn z aplikatora wyciekł na skórę i trzymaj pojemnik z daleka od oczu. Musisz odczekać 15 sekund, trzymając aplikator skierowany do dołu przed dotknięciem brodawki lub kurzajki. Dzięki temu cały płyn zgromadzi się na dole aplikatora i osiągnie temperaturę zamrażania optymalną dla efektywnej kuracji.
5. Upewnij się, że brodawka bądź kurzajka jest skierowana ku górze. Trzymając aplikator skierowany w dół należy delikatnie przyłożyć jego końcówkę do centralnej części brodawki bądź kurzajki na 30 minimum sekund, ale nie dłużej niż 40 sekund. Nie wolno trzeć aplikatorem po powierzchni brodawki bądź kurzajki. Wyrzuć aplikator po każdym użyciu.

Skład

Dimethyl Ether, Propane, Isobutane, Propellent: Hydrocarbon.

Przechowywanie

W temperaturze otoczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt nie może być stosowany przez diabetyków i osoby ze słabym krążeniem krwi.
- Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.
- Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
- Używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
- Zawsze stosować z aplikatorami dostarczonymi przez producenta w oryginalnym opakowaniu.
- Niewłaściwe użycie produktu może powodować oparzenia, bliznowacenie zdrowych tkanek oraz ślepotę.
- Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.

Dodatkowe informacje

Skuteczny i łatwy sposób usuwania pospolitych brodawek i kurzajek oparty na metodzie natychmiastowego zamrażania. Po użyciu powstanie pęcherzyk. Kurzajka bądź brodawka powinna odpaść w przeciągu 10-14 dni, a na jej miejscu odrośnie nowa, zdrowa skóra. Nie należy aplikować preparatu na pojedynczą kurzajkę lub brodawkę więcej niż 4 razy.