

Schulke Octenilin, żel do ran, 20 ml



Cena: 31,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Producent	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wskazania

Schulke Octenilin, żel do ran, wskazany jest do stosowania:

- do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach,
- do ran z martwicą suchą i rozpułną,
- w ranach ziarninujących i pokrywających się nabłonkiem,
- w ranach oparzeniowych,
- do utrzymania idealnego bilansu wilgoci w ranie,
- do wilgotnej terapii ran chronicznych - głębokich i powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych.

Stosowanie

- Tylko do zastosowania zewnętrznego na rany skóry.
- Ranę pokryć całkowicie żelem na rany (1-5 mm). Do pokrywania lub wypełniania rany żel na rany można nakładać na okłady, gazy, kompresy oraz inne materiały wchłaniające lub materiały wypełniające ranę. Dzięki nawilżeniu powierzchni rany możliwe jest delikatne oderwanie nalotów i ich usunięcie podczas następczej zmiany opatrunku. Octenilin żel na rany może pozostać na ranie do następczej zmiany opatrunku.
- Częstość zmiany opatrunku zależy od właściwości rany i ilości wysięku oraz należy ją dostosować do konkretnej sytuacji i stanu rany, jednak powinno to mieć miejsce po max. 3 dniach.
- W połączeniu z natłuszczonymi gazami opatrunek należy zmieniać codziennie i oczyszczać ranę. Należy zwracać uwagę na dobór opatrunku odpowiedni do konkretnej fazy gojenia. Opatrunek wtórny należy tak dobrać, aby z jednej strony żel nie wysychał, a z drugiej strony krawędzie rany i skóra otaczająca ranę nie ulegały maceracji.
- Pacjenci z przewlekłymi ranami bardzo często są wrażliwi na zmiany temperatur - Żel bezpośrednio przed użyciem można podgrzać do temperatury ciała.

Skład

oktenidyny dichlorowodorek, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Przechowywanie

Nie wystawiać preparatu na działanie promieni słonecznych.

Nie zamrażać.

Chronić przed dziećmi.

Dodatkowe informacje

- nie stosować w połączeniu z oczyszczającymi mydłami, maściami, olejkami, enzymami itp., ponieważ może to prowadzić do niekorzystnego wpływu na konserwację,
- nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi PVP-jod, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień i ograniczenia działania antyseptycznego PVP-jodu,
- stosować tylko zewnętrznie na rany,
- upewnić się, że preparat nie jest podawany pod ciśnieniem,
- nie stosować do infuzji i iniekcji,
- nie połykać,
- nie spożywać,
- używać produkt tylko z nieuszkodzonego opakowania,
- nie stosować na chrząstke szklistej, do oczu, w uszach, nosie, pęcherzu moczowym i jamie brzusznej,
- termin ważności: 4 lata. Po pierwszym otwarciu, produkt należy zużyć w ciągu 6 tygodni. Nie stosować po upływie terminu ważności.