

Silaurum, silikonowe plastry na blizny 5 x 30 cm, 5 sztuk



Cena: 90,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Postać	plastry
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny Silaurum, silikonowe plastry na blizny 5 x 30 cm jednorazowego użytku, miękkie, samoprzylepne plastry silikonowe na blizny świeże oraz istniejące. Plaster jest cienki i transparentny, dzięki temu zapewnia wygodę używania i dyskrecję. Łatwo dopasowują się do skóry, zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia w obrębie blizny. Plastry rozjaśniają i wygładzają blizny, zmniejszając ich widoczność.

Zastosowanie

- Wspomaganie leczenia blizn różnego pochodzenia: pooperacyjnych, w tym po cesarskim cięciu, pooparzeniowych, pourazowych.
- Wygładzanie i rozjaśnianie blizn nowo powstałych oraz już istniejących.
- Zmniejszenie widoczności blizny.
- Wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i osuszyć obszar blizny przed nałożeniem.
- Wyjąć plaster z opakowania ochronnego, a następnie delikatnie usuwając folię zabezpieczającą, przyłożyć plaster samoprzylepną stroną do blizny.
- Zdejmując ostrożnie resztę folii ochronnej, przykleić cały plaster na powierzchnię blizny.
- Należy unikać dotykania samoprzylepnej strony plaster przed nałożeniem.
- Należy zawsze stosować taką wielkość plastra, aby cała blizna była nim pokryta.
- Zaleca się wymianę plastra co 3-5 dni lub gdy przestaje już przywierać do skóry.
- Unikać moczenia miejsca z nałożonym plastrem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jego przedwczesnego odklejenia. W celach higienicznych zaleca się, aby raz dziennie zdjąć plaster, a następnie oczyścić i osuszyć skórę przed ponownym nałożeniem.
- W przypadku mniejszych blizn plaster można dociąć według potrzeb.

Skład

Żel silikonowy.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować na otwarte rany, zmieniona zapalnie skórę i błony śluzowe.
- Nie stosować u osób uczulonych na silikon.
- Nie stosować równocześnie z innymi wyrobami lub lekami do leczenia blizn bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji skórnych po zastosowaniu plastra należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.