

Sinulan Rinse, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek



Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Postać	saszet.
Producent	STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Sinulan Rinse, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok. W zestawie znajduje się 30 saszetek do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu. W połączeniu z butelką z zestawu podstawowego udrażnia i oczyszcza nos oraz zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstanie infekcji.

Zastosowanie

Zapobiegawczo i w objawowym leczeniu nosa i zatok, szczególnie w przypadku: zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, katarze o różnym podłożu, w higienie zatok i nosa.

Sposób użycia

Dzieci powyżej 4. roku życia i dorośli:

- płukanie przeprowadzić 1-3 razy dziennie lub wg wskazań lekarza,
- w celach profilaktycznych stosować 2-3 razy w tygodniu,
- godzinę po płukaniu nie wychodzić na zewnątrz - przy temperaturze poniżej 19oC,
- płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem,
- każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody,
- do płukania należy używać tylko butelki z podstawowym Sinulan Rinse.

Skład

Chlorek sodu.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.

- W oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania:

- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego,
- otwarte, niegojące się rany w nosie, szczególnie po operacjach,
- całkowita blokada nosa lub infekcja ucha,
- problemy z równowagą lub poważne krwawienie z nosa,
- po operacjach laryngologicznych (należy skonsultować się z lekarzem).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.