

Softeye Blepha, chusteczki okulistyczne, 14 sztuk

Cena: 31,00 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	14 sztuk
Postać	chusteczki okulistyczne
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Softeye Blepha, to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Zastosowanie

Codzienna higiena powiek dla osób dorosłych i dzieci.

Sposób użycia

- Umyj dokładnie ręce. Otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.
- Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając oko zamknięte.
- Powtarzaj czynność przez kilka minut, aby usunąć wydzielinę z oka lub inne pozostałości (smog, kurz, puder itp.). Niektórzy pacjenci odczuwają lekkie, szybko przemijające uczucie pieczenia w trakcie stosowania wyrobu lub tuż po zakończeniu.
- Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce. Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.
- Ciepły kompres: aby produkt skuteczniej usunął wydzielinę z oka, zanurz zamkniętą saszetkę z chusteczką w ciepłej wodzie (o temperaturze nieprzekraczającej 45 °C) na dziesięć minut. Po ogrzaniu chusteczka musi być natychmiast wykorzystana jako kompres.
- Zimny kompres: aby wzmocnić uczucie ulgi dla oka, szczególnie w przypadku zaczerwienienia lub obrzęku powiek, należy schłodzić zamkniętą saszetkę w niskiej temperaturze (nie niższej niż 5 °C) przez dziesięć minut.

Skład

Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter® (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzyny amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoilaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyletoylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik.
- W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.

Dodatkowe informacje

- Do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach.
- Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku, należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.
- Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności.
- Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.
- Produktu nie należy połykać