

Softeye Lipid 0,3 ml x 20 pojemników



Cena: 31,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	0,3 ml x 20 pojemników
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wskazania

Łagodzenie dyskomfortu ze strony oczu związanego ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

Działanie

Nawilża i nawadnia powierzchnię oka łagodząc objawy suchości i dyskomfortu ze strony oczu różnego pochodzenia.

Składniki

Olej sojowy, naturalne fosfolipidy, trometamol, glicerol, woda oczyszczona.

Stosowanie

- 1 kroplę zakropić do worka spojówkowego 4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza,
- przed wkropleniem umyć ręce,
- oderwij pojemnik jednodawkowy, który nie może być naruszony,
- należy otworzyć, przekręcając i odrywając górną część,
- zakropić preparat Softeye Lipid do oka, nie dotykając oka lub jakiegokolwiek innej powierzchni końcówką pojemnika

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 30 .

Nie zamrażać.

Po otwarciu zaleca się przechowywanie pozostałych pojemników jednodawkowych w tej samej aluminiowej torebce.

Dodatkowe informacje

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu lub dołączonej ulotce.