

# Stick Off, spray do usuwania opatrunków, 50 ml



Cena: 35,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Opakowanie	50 ml
Postać	spray
Producent	CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

StickOff, wyrób medyczny w postaci spray do bezbolesnego usuwania opatrunków, plastrów, przylepców, taśm mocujących, opatrunków samoprzylepnych. Łatwy i praktyczny w użyciu. Może być stosowany pod różnym kątem dzięki temu ułatwia usunięcie plastra z trudno dostępnego miejsca na ciele. Spray szybko wysycha, dzięki temu można zastosować kolejny opatrunek czy plaster. Może być stosowany do usuwania plastrów o dużej sile klejenia.

### Zastosowanie

Spray do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju plastrów, przylepców, taśm mocujących. Także plastrów nikotynowych i hormonalnych.

### Sposób użycia

- Opatrunek na włókninie: nanieść preparat na powierzchnię opatrunku. Odczekać kilka sekund i delikatnie go usunąć.
- Plastry wodoodporne, kinesioping, plastry nikotynowe i inne: odklej róg opatrunku, nanieść preparat pod jego krawędź i delikatnie odklejać jednocześnie aplikując preparat.
- U noworodków lub w okolicach oczu: nanieść niewielką ilość preparatu do nasadki zabezpieczającej. Zmocz patyczek higieniczny w wyrobie i nanieść go na opatrunek. Odczekać kilka sekund i delikatnie usunąć opatrunek.

### Skład

Heksametylodisiloksan.

### Przechowywanie

- Aerosol skrajnie łatwopalny.
- Chronić przed ogniem. Źródłem ciepła, gorącymi powierzchniami i innymi źródłami zapłonu.
- Chronić przed słońcem.
- Chronić przed dziećmi.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie stosować w przypadku uczulenia na składnik wyrobu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej przestać stosować i skórę spłukać dużą ilością ciepłej wody.
- Nie wdychać rozpylonego wyrobu. Używać w pomieszczeniach wentylowanych.
- Nie stosować bezpośrednio na oczy.
- Aplikacja u dzieci powinna odbywać się pod kontrolą dorosłych.

**Dodatkowe informacje**

- Nie zawiera alkoholu.
- Nie wysusza i nie podrażnia skóry.