

Sutricon CC, silikonowe plastry na blizny z witaminą E 5 cm x 30 cm, 5 sztuk



Cena: 140,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Postać	plastry
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Plastry silikonowe Sutricon CC skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn. Struktura plastra, zawierająca żel silikonowy, posiada właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i zapobieganie procesowi nadmiernej transepidermalnej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry silikonowe na blizny redukują dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia. Plastry silikonowe Sutricon CC zostały dodatkowo wzbogacone o witaminę E, która wspomaga działanie silikonu, co przekłada się na lepsze efekty terapii leczenia blizn w porównaniu do zastosowania samego silikonu. Witamina E stymuluje epitelializację, pozwala utrzymać odpowiednie nawilżenie naskórka oraz zdrowy wygląd skóry.

Zastosowanie

Sutricon CC z witaminą E przeznaczone są do stosowania w leczeniu blizn po cesarskim cięciu.

Składniki

Żel silikonowy z witaminą E, elastyczna membrana poliuretanowa.

Sposób użycia

Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania. Długość terapii to średnio:

- minimum 3 miesiące w przypadku blizn świeżych,
- minimum 6 miesięcy w przypadku blizn starszych.

Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon CC przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 12 miesięcy.

- Po całkowitym zagojeniu rany lub po zdjęciu szwów (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować plastry silikonowe Sutricon.
- Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
- Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony.
- Plastry silikonowe na blizny Sutricon można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.

- Jeden plaster Sutricon można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne.

Jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny.