

Sutricon Kids, silikonowe plastry na blizny dla dzieci od 6 miesiąca, 5 sztuk



Cena: 79,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Postać	plastry
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Sutricon Kids, silikonowe plastry na blizny dla dzieci od 6 miesiąca. Plastry dopasowują się do anatomicznych kształtów ciała. Zmniejszają, rozjaśniają i wygładzają bliznę. Plastry redukują dyskomfort związany z blizną (ból, swędzenie, uczucie ciągnięcia). Zapobiegają powstawaniu blizn przerostowych i keloidów. Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze. Plastry charakteryzują się doskonałą adhezyjnością (przyczepnością), dzięki czemu możliwa jest wielokrotna aplikacja. Plaster posiada wymiary 3 cm x 7 cm.

Zastosowanie

Stosowane podczas leczenia:

- blizn dzieci już od 6. miesiąca życia,
- w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (powstałych nawet przed 9 laty),
- blizn pourazowych,
- blizn pooparzeniowych,
- blizn pooperacyjnych,
- głębokich rozcięć i skaleczeń,
- w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu.

Sposób użycia

- Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon.
- Plaster 5x30 cm należy dociąć do wielkości blizny z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony.
- Przy bliznie o rozmiarach 0,5 x 14 cm z jednego opakowania Sutricon (5 cm x 30 cm, 5 plasterów w opakowaniu) można uzyskać 30 mniejszych plasterów.
- Plaster można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, osuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie.
- Jeden plaster można nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjnej. Plastra nie należy myć, ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.

Skład

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.