

Sutricon, silikonowe plastry na blizny 5 cm x 30 cm, 5 sztuk



Cena: 135,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 opakowanie, 5 sztuk
Postać	plastry
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 6 miesiąca

Opis produktu

Opis

Silikonowe plastry Sutricon do stosowania na blizny. Mogą być stosowane przez dzieci od 6 miesiąca życia i dorosłych. Plastry skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn. Ich innowacyjna struktura, zawierająca żel silikonowy, posiada właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i zapobieganie procesowi nadmiernej transepidermalnej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry redukują dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia.

Zastosowanie

- Blizny pourazowe, poparzeniowe, pooperacyjne,
- Zapobieganie nieprawidłowemu bliznowaceniu.

Sposób użycia

- Rana musi być całkowicie zagojona (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) aby można zastosować plastry.
- Przed zastosowaniem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster, to 3-5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster.

Długość terapii to średnio:

- min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych,
- min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych.

Skład

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować na rany, które nie są zagojone.