

Sutricon, żel silikonowy na blizny, 15 g



Cena: 33,24 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	15 ml
Opakowanie	15 ml
Postać	żel
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Żel Sutricon poprawia wygląd blizny, rozjaśnia i zmniejsza ją. Wspomaga leczenia blizn przerostowych i keloidów. Może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci od 1. roku życia. Matowe wykończenie, dzięki temu może być stosowany pod makijaż. Wyrównuje koloryt, zmniejsza widoczność blizny. Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem. Niewodnista, żelowa konsystencja, przezroczysty, bezwonny.

Zalecane spożycie

Żel można stosować do codziennej pielęgnacji:

- rozstępów,
- blizn potrądzikowych,
- blizn po zabiegach chirurgicznych i urazach,
- blizn pooparzeniowych.

Sposób użycia

- Żel można stosować po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka). Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny należy nanieść niewielką ilość preparatu i masować ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcierając bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców.
- Stosowanie żelu - minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest indywidualna i jest zależna od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju: min 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn; dłużej, bo nawet do 6 m-cy w przypadku starszych blizn (nawet 9 letnich).

Skład

Polisiloksany, dwutlenek krzemu.