

# SutriHeal Forte 10% maść do miejscowego leczenia ran, 30 g



Cena: 57,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 3 roku życia

## Opis produktu

### Opis produktu

SutriHeal Forte 10% maść do gojenia zakażonych i niezakażonych ran jest wyrobem medycznym, nie zawierającym antybiotyku. Maść jako jedyna na polskim rynku zawiera formułę kwasów żywiczych i lignanów na lipofilowym podłożu. Dzięki zawartości emolientów chroni skórę wokół rany, zapewniając odpowiednie nawilżenie. SutriHeal Forte nie zawiera antybiotyku przez co nie wywołuje odporności, lecz dzięki zawartości biologicznie aktywnych składników polecany jest w celu leczenia ran zakażonych i niezakażonych, takich jak:

- Rany ostre (skaleczenia, zadrapania, zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne),
- Rany powierzchniowe (problemy podologiczne, otarcia, pęknięcia naskórka, powierzchniowe uszkodzenia naskórka),
- Rany przewlekłe (odleżyny, oparzenia, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia podudzi).

Może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia do długotrwałego stosowania

### Zastosowanie

Maść do miejscowego leczenia ran:

- skaleczeń,
- otarć,
- pęknięć,
- oparzeń,
- owrzodzeń skóry.

### Sposób użycia

- Maść nakładać bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie.
- W razie potrzeby zabezpieczyć bandażem lub opatrunkiem przepuszczającym powietrze.
- Po każdej zmianie opatrunku należy ranę oczyścić z pozostałości maści.

### Składniki

Petrolatum, Parafinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, S orbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid.

#### Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- Brak informacji na temat możliwych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią. Maści SutriHeal Forte 10% nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie stosować przy stwierdzonej alergii na żywice.
- Unikać dostania się maści do oczu lub ust.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.