

SutriSept Hydrożel na rany , 100 ml



Cena: 74,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	hydrożel
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

SutriSept, hydrożel na rany to przezroczysty, bezbarwny, bezzapachowy żel stosowany do mechanicznego oczyszczania, odkażania i nawilżania ran przewlekłych i zakażonych oraz oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany. Żel tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechanicznie zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany. Nie wpływa na opóźnienie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie.

Zastosowanie

Do stosowania w poniższych wskazaniach:

- ran powstałych od oparzeń radiacyjnych,
- miejsc wprowadzenia cewników urologicznych,
- oczyszczanie, irygacja i nawilżanie ran ostrych (np. ran urazowych, które powstały w wyniku skaleczeń, rozerwania, zadrapań i otarć, zgnieceń, ugryzień, ukąszeń itp. w tym także ran chirurgicznych), ran przewlekłych (np. owrzodzeń cukrzycowych, owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.),
- ran powstałych w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzeń 1. i 2. stopnia, oparzeń chemicznych itp.),
- ran powstałych w wyniku porażenia prądem elektrycznym,
- skóry w okolicach stomii, przetoki, ropni.

Sposób użycia

- Całą ranę i jej okolicę należy dokładnie oczyścić przy użyciu SutriSept Płyn na rany w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zanieczyszczeń i drobnoustrojów na powierzchnię rany.
- Przed założeniem opatrunku i bandaża łóżysko rany należy pokryć dużą ilością produktu SutriSept Hydrożel na rany.
- SutriSept Hydrożel na rany może pozostawać na powierzchni rany aż do następnej zmiany opatrunku. W ten sposób SutriSept Hydrożel na rany utrzymuje powierzchnię rany stale nawilżoną, a tym samym minimalizuje przywieranie do niej opatrunku.
- Tak oczyszczoną ranę należy potem odpowiednio zabandażować.
- Utworzoną przez SutriSept Hydrożel na rany warstwę ochronną pokrywającą powierzchnię rany można łatwo usunąć przy następnej zmianie opatrunku. Do tego celu poleca się użycie SutriSept Płyn na rany podczas zmiany opatrunku.

- Aplikację należy regularnie powtarzać w okresie gojenia rany m.in. w celu usunięcia obumarłych tkanek i strupków.

Skład

0,1% PHMB (poliheksanid), 1 % Poloksamer 188.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
- Nie stosować do infuzji ani w iniekcjach.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakąkolwiek substancję zawartą w produkcie.
- Nie połykać.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.