

## SutriSept, płyn na rany, 250 ml



Cena: 54,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

SutriSept, płyn na rany oczyszcza rany mechanicznie. Płyn przyczynia się do gojenia się rany zapewniając wysoce pozytywne działanie oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany. Środki powierzchniowo czynne (PHMB, Poloksamer 188) poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany przed jej opatrzeniem.

#### Zastosowanie

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne); rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.), rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.),
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego, popromienne,
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych,
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.
- Oczyszczanie i pielęgnacja powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczenia, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

#### Sposób użycia

- Całą ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić stosując SutriSept Płyn na rany w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia zanieczyszczeń i drobnoustrojów na powierzchnię rany. W celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się moczenie rany głębokiej z rozległą martwicą tkanek przez co najmniej 10-15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez nałożenie mokrego opatrunku). Aplikację można powtarzać stosownie do warunków w ranie bez żadnych ograniczeń czasowych. Płynu nie należy rozcieńczać. Oczyszczoną ranę można pokryć wyrobem medycznym SutriSept Hydrożel na rany, a następnie odpowiednio zabandażować.
- Zastosowanie z opatrunkami i bandażami: dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując

SutriSept Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 min. aż zmiękną, po czym usunąć je ostrożnie z rany. W celu utrzymania wilgotnego środowiska w ranie, opatrunek można zmieniać codziennie, a jeśli to konieczne – nawet kilka razy dziennie. SutriSept Płyn na rany wykazuje kompatybilność ze wszystkimi nowoczesnymi opatrunkami na rany.

**Skład**

0,1% PHMB (polihexanid), Poloksamer 188 1%.

**Przechowywanie**

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
- Zawiera poliheksametylen biguanidu (polihexanid, PHMB). Może wywołać reakcję alergiczną.
- Nie należy stosować wyrobu u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników.
- Płyn na rany nie wolno połykać.

**Dodatkowe informacje**

- W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na rany.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.