

SutriSept, płyn na rany, 50 ml



Cena: 31,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Opakowanie	50 ml
Postać	płyn
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

SutriSept, płyn na rany, oczyszcza rany mechanicznie. Środki powierzchniowo czynne (PHMB, Poloksamer 188), poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany przed jej opatrzeniem. Płyn na rany przyczynia się do gojenia się rany zapewniając wysoce pozytywne działanie oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany. Płyn utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie, bezbolesnie oczyszcza rany i oparzenia.

Zastosowanie

Płyn do oczyszczania, przemywania, nawilżania i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych oraz oparzeń 1. i 2. stopnia. Odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

Sposób użycia

Przed założeniem opatrunku:

- całą ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić stosując SutriSept Płyn na rany.
- Zaleca się moczenie rany głębokiej z rozległą martwicą tkanek przez co najmniej 10-15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez nałożenie mokrego opatrunku).
- Aplikację można powtarzać stosownie do warunków w ranie bez żadnych ograniczeń czasowych.
- Płynu nie należy rozcieńczać.
- Oczyszczoną ranę można pokryć wyrobem medycznym SutriSept Hydrożel na rany, a następnie odpowiednio zabandażować.

Zastosowanie z opatrunkami i bandażami:

- Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 min. aż zmiękną, po czym usunąć

je ostrożnie z rany.

- Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.
- W celu utrzymania wilgotnego środowiska w ranie, opatrunek można zmieniać codziennie, a jeśli to konieczne – nawet kilka razy dziennie. SutriSept Płyn na rany wykazuje kompatybilność ze wszystkimi nowoczesnymi opatrunkami na rany.

Skład

0,1% PHMB (poliheksanid), 1 % Poloksamer 188.