

# Tantum Rosa, irygator do higieny intymnej 500 ml, 1 sztuka



Cena: 27,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	500 ml
Opakowanie	500 ml
Postać	irygator
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Tantum Rosa, irygator do higieny intymnej 500 ml, bezpieczny, wykonany z elastycznego, gładkiego plastiku, wielokrotnego użycia. Służy do wykonywania płukania pochwy.

### Zastosowanie

Irygator do płukania pochwy.

### Sposób użycia

- Płyn do irygacji przygotować używając przegotowanej wody o temperaturze ciała. Napełnić zbiornik płynem do płukania w ilości 500 ml. Nie stosować roztworów środków drażniących i środków powierzchniowo czynnych. Następnie na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora.
- Irygację najlepiej wykonać w pozycji leżącej w pustej wannie, lub stojącej pod prysznicem, lub siedzącej np. na sedesie. Wprowadzić ostrożnie końcówkę irygatora do pochwy najgłębiej jak jest to możliwe.
- Zbiornik trzymać dwoma rękoma. Naciskać zbiornik aż do jego opróżnienia.
- Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do zbiornika wydzieliny z pochwy.
- Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora i umyć części w ciepłej wodzie z mydłem (do 40oC). Wypłukać dokładnie i osuszyć.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Dziewczeta, które nie rozpoczęły współżycia seksualnego nie powinny używać tego produktu.
- Kobiety w ciąży przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

### Dodatkowe informacje

- Nie należy myć w zmywarce.

- Nie sterylizować.
- Nie podgrzewać powyżej 40oC.
- Nie stosować żrących środków do dezynfekcji.
- Obie części myć w ciepłej wodzie do 40oC (w wodzie z mydłem), dokładnie wyptukać i wysuszyć.