

Termofor gumowy EKO w pokrowcu 2l, 1 sztuka



Cena: 23,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Termofor gumowy EKO w pokrowcu, wykonany z wysokiej jakości naturalnej gumy, z ryflowanymi ściankami, do stosowania w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia dolegliwości bólowych przez dorosłych.

Stosowanie

- przygotowaną wodą o temperaturze ok. 50° należy napełnić termofor, wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. Podczas napełniania termofor należy trzymać za szyjkę w pozycji pionowej,
- należy pozbyć się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylenie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni,
- należy zakręcić dokładnie kurek i sprawdzić jego szczelność odwracając termofor do dołu,
- następnie załóż pokrowiec.

Przechowywanie

Po użyciu należy wylać wodę i pozostawić termofor wlewem do dołu aby osuszyć.

Bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy unikać kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Ważne

Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami.