


Test C1, szybki test antygenowy na Candida Albocans, 1 sztuka

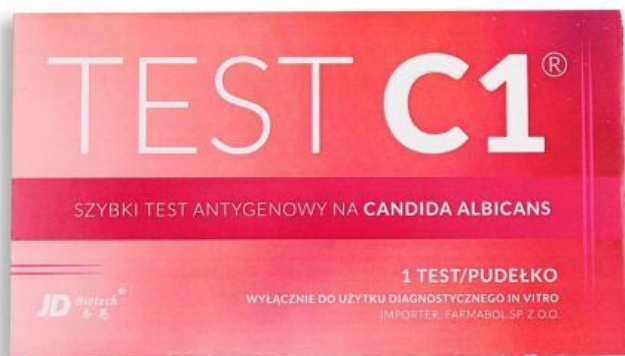

Cena: 58,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test C1, to szybki test antygenowy na Candida Albocans. Jest to grzyb pasożytniczy naturalnie zasiedlający ludzki organizm, który w przypadku osłabienia odporności może się nadmiernie namnażać i powodować infekcje grzybicze określane mianem kandydozy lub drożdżycy, atakujące głównie układ moczowo-płciowy. Drożdżycą jest również najczęstszą przyczyną infekcji dróg śluzowych przewodu pokarmowego i jelit.

Do zakażenia kandydozą dochodzi w przypadku:

- długiej antybiotykoterapii,
- osłabienia odporności, w wyniku przemęczenia, stresu, cukrzycy, podczas ciąży, w czasie terapii hormonalnej,
- w przebiegu chorób osłabiających układ odpornościowy np. AIDS,
- w trakcie zabiegów inwazyjnych, w przypadku stosowania cewników, sztucznych zastawek.

Badać powinny się kobiety w ciąży, przed porodem, oraz wszyscy, niezależnie od płci, podejrzewający zagrzybienie organizmu.

Zastosowanie

Objawy zakażenia grzybicą :

- świąd,
- zaczerwienienie błon śluzowych,
- podrażnienie,
- pieczenie,
- pęcherzyki ropne,
- ból.

Badniu powinny się podjąć kobiety w ciąży, przed porodem, oraz wszyscy, niezależnie od płci, podejrzewający zagrzybienie organizmu.

Sposób użycia

- Zbierz mocz do pojemnika na mocz.

- Otwórz fioletową nakrętkę próbki.
- Pobierz 0,5 ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza.
- Dodaj mocz do próbki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5 ml buforu.
- Zamknij nakrętkę i dobrze wymieszaj przez około 5-6 sekund.
- Wyjmij kasetkę testową z woreczka foliowego. Nie używać po godzinie od otwarcia woreczka foliowego.
- Zdejmij bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki.
- Umieść 3-4 krople mieszanki w obszarze "S" kasetki testowej
- Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

Zaleca się wykonanie go z próbki moczu porannego, ponieważ najwyższe stężenie Candida Albicans występuje o poranku.

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- urządzenie testujące- kasetka,
- zakraplacz,
- miseczkę na mocz,
- probówkę ekstrakcyjną z buforem,
- instrukcję.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Oznaczony znakiem CE 0123 zgodnie z dyrektywą IVD 98/97/EC dotyczącą wyrobów medycznych.

Galeria

