

Test G1, szybki test antygenowy na Gardnerella Vaginalis, 1 sztuka



Cena: 64,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test G1 to szybki test antygenowy na Gardnerella Vaginalis wykrywany w próbkach moczu.

Gardnerella vaginalis jest najczęstszą przyczyną zakażeń dróg płciowo-moczowych kobiet i mężczyzn, mężczyźni najczęściej są jedynie jej nosicielami.

Ta bakteria należy do beztlenowców wywołujących wiele nieprzyjemnych objawów, do których należy charakterystyczny, nieprzyjemny „rybi” zapach z dróg płciowych kobiety, pieczenie, świąd. W wielu przypadkach zakażenie przebiega w sposób bezobjawowy, co powoduje nieświadome zarażanie kolejnych osób.

Nieleczona infekcja Gardnerella vaginalis może prowadzić do niebezpiecznych powikłań, zwłaszcza u kobiet w ciąży. Do najpoważniejszych należą zapalenia miednicy mniejszej, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, poronienia. Inne skutki nieleczonej infekcji to zapalenia szyjki macicy, zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie przydatków. U mężczyzn nie występują typowe objawy zakażenia, Gardnerella vaginalis może wywoływać zapalenia gruczołukrokowego, zapalenia najądrza, a nawet niepłodność.

Zastosowanie

Samokontroli powinny się poddać kobiety w ciąży, przed porodem oraz wszystkie osoby prowadzące bogate życie intymnie, dużo podróżujące, korzystające z publicznych basenów, toalet.

Sposób użycia

- Zbierz mocz do pojemnika na mocz.
- Otwórz fioletową nakrętkę próbki.
- Pobierz 0,5 ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza.
- Dodaj mocz do próbki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5 ml buforu.
- Zamknij nakrętkę i dobrze wymieszaj przez około 5-6 sekund.
- Wyjmij kasetkę testową z woreczka foliowego. Nie używać po godzinie od otwarcia woreczka foliowego.
- Zdejmij bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki.
- Umieść 3-4 krople mieszanki w obszarze "S" kasetki testowej
- Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

Zaleca się wykonanie go z próbki moczu porannego.

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- urządzenie testujące w postaci kasetki,
- zakraplacz,
- miseczkę na mocz,
- probówkę z buforem ekstrakcyjnym.

Opakowanie i dokładna instrukcja opisane są w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Oznaczony znakiem CE 0123, zgodnie z dyrektywą IVD 98/97/EC dotyczącą wyrobów medycznych.

Galeria

