

Test S3, szybki test na Candida Albicans, Trichomonas Vaginalis, Gardnerella Vaginalis, 1 sztuka



Cena: 113,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test S3 to szybki test dla kobiet i mężczyzn na wykrycie obecności Candida Albicans, Trichomonas Vaginalis, Gardnerella Vaginalis w moczu, dzięki wizualnemu wynikowi można określić rodzaj zakażenia.

Candida albicans (wywołuje kandydozę), Trichomonas vaginalis (wywołuje rzęsistkowicę pochwową) oraz Gardnerella vaginalis (odpowiada za bakteryjne zakażenie pochwy) są najczęściej występującymi zakażeniami.

Zastosowanie

Objawy zakażenia:

- nietypowa wydzielina,
- nietypowa częstotliwość oddawania moczu,
- ból podczas stosunku płciowego,
- rybi zapach,
- ból podczas oddawania moczu,
- pochwa i srom mogą swędzieć i sprawiać dyskomfort.

Sposób użycia

- Zbierz mocz do pojemnika.
- Otwórz fioletową nakrętkę probówki.
- Pobrać 0,5 ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza.
- Dodać mocz do probówki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5 ml buforu.
- Zamknij nakrętkę i dobrze wymieszaj przez około 5-6 sekund.
- Wyjmij kasetkę testową z woreczka foliowego. Nie używać po godzinie od otwarcia woreczka foliowego.
- Zdejmij bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki.
- Umieść 3-4 krople mieszanki moczu w obszarze "S" kasetki testowej.
- Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

Zaleca się wykonanie go z próbki moczu porannego.

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- urządzenie testujące w postaci kasetki,
- zakraplacz,
- miseczkę na mocz,
- probówkę z buforem ekstrakcyjnym.

Opakowanie i dokładna instrukcja opisane są w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Oznaczony znakiem CE 0123, zgodnie z dyrektywą IVD 98/97/EC dotyczącą wyrobów medycznych.

Galeria

