

# Test T1, szybki test antygenowy na Trichomonas Vaginalis, 1 sztuka



Cena: 61,00 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Test T1, szybki test antygenowy na Trichomonas Vaginalis, tzw. rzesistkiem pochwowym. Jest to pasożyt z grupy wiciowców, bytujący w drogach moczowo-płciowych człowieka, wywołujący chorobę zakaźną rzesistkowicę. Głównym źródłem zakażenia są nosiciele, którzy w większości przypadków nie mają żadnych objawów ani dolegliwości. Do zakażenia dochodzi drogą płciową, podczas stosowania tego samego ręcznika co osoba

zakażona, korzystania z tej samej toalety (np. toalety publicznej), sauny, podczas kąpieli w tej samej wodzie. Osoba zarażona w przeciwieństwie do nosiciela wykazuje wiele objawów ze strony układu płciowo-moczowego.

Rzesistkowica w swoim przebiegu może mieć charakter ostry i przewlekły. Stany przewlekłe u kobiet powodują mikroskopowe zmiany w komórkach nabłonka szyjki macicy, a u mężczyzn przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.

Występowania rzesistkowicy zwiększa ryzyko występowania innych chorób wenerycznych: chłamydiozy, kiły, rzeżączki.

Badaniu powinny się poddać nie tylko osoby z symptomami choroby, ale przede wszystkim kobiety w ciąży i przed porodem, u których rzesistkowica może spowodować przedwczesny poród, niską wagę urodzeniową dziecka oraz zakażenie dziecka podczas porodu.

### Zastosowanie

Badaniu powinny się poddać nie tylko osoby z symptomami choroby, ale przede wszystkim kobiety w ciąży i przed porodem, u których rzesistkowica może spowodować przedwczesny poród, niską wagę urodzeniową dziecka oraz zakażenie dziecka podczas porodu.

### Sposób użycia

- Zbierz mocz do pojemnika na mocz.
- Otwórz fioletową nakrętkę próbki.
- Pobierz 0,5 ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza.
- Dodaj mocz do próbki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5 ml buforu.
- Zamknij nakrętkę i dobrze wymieszaj przez około 5-6 sekund.
- Wyjmij kasetkę testową z woreczka foliowego. Nie używać po godzinie od otwarcia woreczka foliowego.
- Zdejmij bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki.
- Umieść 3-4 krople mieszanki w obszarze "S" kasetki testowej
- Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

#### Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- urządzenie testujące,
- zakraplacz,
- miseczkę na mocz,
- probówkę ekstrakcyjną z buforem,
- instrukcję wykonania testu.

#### Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/97/EC dotyczącą wyrobów medycznych.

#### Galeria

