

Thealipid, krople do oczu, 10 ml



Cena: 56,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Thealipid jest wyrobem medycznym który chroni powierzchnie oka, przywracając naturalną warstwę lipidową, zatrzymując wodę i tworząc cienką barierę ochronną, która imituje naturalny film łzowy. Thealipid to mikroemulsja składająca się z fazy wodnej i lipidowej. Główne składniki fazy lipidowej to substancje występujące naturalnie we łzach (fosfolipidy i trójglicerydy średniołańcuchowe). Brak konserwantów w składzie sprawia, że mikroemulsja chroni tkanki oka i zapobiega reakcjom alergicznym u pacjentów uczulonych na ten rodzaj środków chemicznych.

Zastosowanie

- Pomaga ograniczać uczucie bólu lub pieczenia, niewyraźne widzenie, wrażenie obecności ciała obcego w oku, światłowstręt i łzawienie u pacjentów z suchym okiem wynikającym z nadmiernego parowania łez.
- Wspomaga fizjologiczny proces gojenia rogówki po operacji oka, tworząc cienką, ochronną barierę hydrofobową.
- Przywraca naturalną warstwę lipidową, chroni powierzchnie oka i na długo łagodzi objawy suchego oka.
- Pomaga przywracać mikrośrodowisko na powierzchni oka uszkodzone wskutek zwiększonej tendencji do parowania łez, niestabilności filmu łzowego, stosowania soczewek kontaktowych, długiego korzystania z ekranów, odniesionych urazów, przebytych zabiegów refrakcyjnych i innych operacji oka, a także chorób takich jak dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD).

Sposób użycia

Zakraplać 1 lub 2 krople do każdego oka rano i (lub) wieczorem, w zależności od potrzeb lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Skład

Fosfolipidy sojowe, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), olej sojowy, gliceryna, wersenian disodowy, α -tokoferol oraz woda oczyszczona.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze do 25°C,

- Po otwarciu buteleczki zużyć jej zawartość w ciągu 90 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować wyrobu Thealipid u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie wkraplać produktu do oka jednocześnie z innymi substancjami, odczekać co najmniej 15 minut przed wkropleniem innych kropli do oczu.
- Produkt może być stosowany bez zdejmowania soczewek kontaktowych, mimo wszystko może powodować dłuższe utrzymywanie się niewyraźnego widzenia. Po wkropleniu produktu Thealipid odczekać co najmniej 15 minut przed założeniem soczewek.

Dodatkowe informacje

Data ważności kropli w zestawie: 30.04.2024