

ThermaCare kompresy rozgrzewające, na plecy i stawy biodrowe, 4 sztuki



Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 sztuki
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

ThermaCare kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni lub stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, przeciążeniami, skręceniami, zapaleniem stawów. Ciepło kompresu wnika głęboko i rozluźnia napięte mięśnie, działając w miejscu bólu. Kompresy łagodzą ból do 16 godzin (8 godzin podczas noszenia i 8 godzin ulgi po zdjęciu kompresu).

Zastosowanie

Łagodzenie bólów mięśni lub stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, przeciążeniami, skręceniami, zapaleniem stawów.

Sposób użycia

- Rozerwij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem. Czas jaki kompres potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić 30 minut.
- Umieść kompres w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami ciepłymi skierowanymi w stronę skóry. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres na warstwę ubrania (lub materiału), tak aby kompres przylegał bezpośrednio do skóry.
- Nie stosować dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie używać kompresu:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek ciepłych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty,
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę),
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną, uszkodzoną skórę,
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin,
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu,
- na obszar ciała z zaburzonym czuciem temperatury,
- z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi),
- u osób, które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

Dodatkowe informacje

- Produkt nie zawiera substancji leczniczych.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.

