

Tik'Alert, test na boreliozę z krwi do wykrywania przeciwciał IgM anty-Borelia w przypadku ukąszenia kleszcza, 1 sztuka



Cena: 51,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Tik'Alert, test na boreliozę z krwi do wykrywania przeciwciał IgM anty-Borelia w przypadku ukąszenia kleszcza, to profesjonalny, test domowego użyciu wykonywany z krwi, która uzyskuje się poprzez nakłucie palca. Użycie testu umożliwi wykrycie wczesnej infekcji bakterią Borrelia po 6 tygodniach od ukąszenia kleszcza. Wykonanie testu oraz odczytanie wyniku jest szybkie i proste, zajmuje kilka minut.

Zastosowanie

Do wczesnego wykrywania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia w krwi pełnej w przypadku ukąszenia kleszcza.

Sposób użycia

Dokładnie umyj ręce mydłem, opłucz pod bieżącą czystą wodą i osusz. Aluminiową torebkę rozerwij wzdłuż krawędzi i wyjmij płytke testową oraz plastikową pipetę. Połóż je na płaskiej powierzchni w zasięgu ręki. Wyrzuć saszetkę z pochłaniaczem wilgoci. Przygotuj nakłuwacz. Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddzieli się od nakłuwacza. Kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzuć nakrętkę. Nie dotykaj przycisku uwalniającego. Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dłoni i pomasuj 10-15 sekund w kierunku opuszka palca, aby zwiększyć ukrwienie. Dociśnij mocno nakłuwacz do bocznej strony zdezynfekowanego opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet. Końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu. Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi. Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Krew migruje przez kapilarę, aż do linii wyznaczonej na pipecie. Za pomocą masażu możesz uzyskać kolejną kroplę krwi, jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta. W miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza. Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety. Poczekać 30-40 sekund, aż cała krew znajdzie się w dołku próbkowym. Odkręć niebieską nakrętkę i dodaj 4 krople diluentu do dołka próbkowego (w przerwach 2-3 sek. pomiędzy każdą kroplą). Trzymaj diluent pionowo. Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut. Nie interpretuj wyniku testu po upływie 15 minut.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0483).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.

- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.