


Undofen Krioterapia, kurzajki brodawki, 50 ml

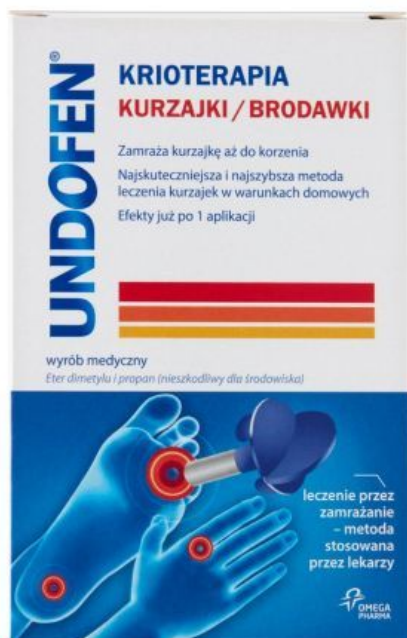

Cena: 57,19 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Opakowanie	50 ml
Postać	aerozol na skórę
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny Undofen Krioterapia to prosty i skuteczny sposób na kurzajki. Preparat pozwala pozbyć się narośli za pomocą tej samej metody zamrażania, której używają lekarze. Zapewnia natychmiastowe wymrażanie kurzajek aż do korzenia, w wyniku czego te stopniowo zanikają lub całkowicie odpadają po kilku dniach, odsłaniając zupełnie nowy i zdrowy naskórek. Undofen Krioterapia pozwala na samodzielne usuwanie kurzajek w zaciszu własnego domu, bez konieczności udawania się do lekarza - zazwyczaj już jeden zabieg umożliwia całkowite jej usunięcie. Wymrażanie kurzajek sprawia, że te odpadają po 10-14 dniach od zastosowania preparatu, a zestaw 12 jednorazowych aplikatorów zabezpiecza przed przenoszeniem wirusa HPV. Preparat na kurzajki można stosować u dzieci już od 4. roku życia. Odpowiedni do usuwania kurzajek na skórze dłoni i stóp.

Zastosowanie

Leczenie kurzajek w warunkach domowych.

Sposób użycia

- Przed leczeniem dobrze jest najpierw wymoczyć skórę w ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie zetrzeć pilniczką zrogowaciały naskórek w okolicy brodawki. Aby wykonać zabieg, należy umieścić piankowy aplikator w uchwycie. Następnie wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki, aby dodatkowo zredukować temperaturę. Na koniec należy przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego do brodawki.
- w przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund
- w przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund

Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i mogą wystąpić lekkie ból i pieczenie, będące reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy.

Przechowywanie

- Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Preparat nie może być stosowany na skórze wrażliwej i podrażnionej.
- Nie stosować na wszelkie znamiona, ciemne pieprzyki, owłosione brodawki.
- Nie stosować u kobiet w ciąży i diabetyków.
- Preparat nie może być stosowany u dzieci poniżej 4. roku życia.
- Osoby ze słabym krążeniem krwi przed użyciem preparatu powinny skonsultować się ze swoim lekarzem.

Dodatkowe informacje

- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Aplikator należy przykładać maksymalnie na 20 sekund (w przypadku brodawek (kurzajek) dłoni) lub na 40 sekund (w przypadkach brodawek stóp).
- Należy opróżnić przed utylizacją. Pozostałości należy utylizować jako odpady specjalne.
- Można stosować u wszystkich członków rodziny, w tym także u dzieci powyżej 4 roku życia.
- Opakowanie zawiera: 1 pojemnik z aerozolem CE 0344, 1 uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator, 12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku, 1 pilniczek wielokrotnego użytku CE, 1 ulotkę informacyjną.