

UniGel Apotex, hydrofilowy żel do leczenia powierzchniowych ran skóry, 5 g

Cena: 26,91 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	5 g
Opakowanie	5 g
Postać	żel
Producent	APOTEX NEDERLAND B.V.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis

UniGel Apotex, hydrofilowy żel do leczenia powierzchniowych ran skóry (otarcia, trudno gojące się rany, skaleczenia, odleżyny, otarcia, oparzenia, owrzodzenia spowodowane niewydolnością krążenia żylnego lub tętniczego). Żel chemicznie wiąże wolne rodniki tlenowe, powstające w trakcie procesu gojenia ran, izoluje ranę przed wtórnym zakażeniem z zewnątrz, wytwarza na ranie elastyczną mechaniczną warstwę ochronną, tworzy odpowiednie środowisko do procesu ziarninowania i wchłania wysięk z rany. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów.

Zastosowanie

Żel do leczenia powierzchniowych ran skóry.

Sposób użycia

Niewielką ilość żelu nałożyć na powierzchnię rany i przykryć ranę sterylnym, nieprzylegającym gazikiem i umocować za pomocą plastra lub bandaża.

Skład

UniGel Apotex to hydrofilowy żel metakrylowy złożony z usieciowanego kopolimeru 2-hydroksyetylometakrylanu, makrogołu i wody destylowanej, który posiada polimerowo wiązane i sterycznie osłaniane grupy aminowe (HEMA-HAS).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze pokojowej.
- Chronić przed dziećmi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- U kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią żel można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- U dzieci żel można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku osób o podwyższonej wrażliwości lub po zastosowaniu w miejscach wrażliwych (np. okolica oczu), może wystąpić lekkie podrażnienie skóry (np.: swędzenie lub zaczerwienienie). W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie żelu i skonsultować się z lekarzem.
- W razie wystąpienia działań niepożądanych (zwiększony ból, zaczerwienienie itp.) należy przerwać stosowanie żelu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować wewnętrznie. Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na tubie.
- Stosować nie dłużej niż 30 dni. Stosowanie żelu powyżej 30 dni należy skonsultować się z lekarzem.
- Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć tubę.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- W razie wystąpienia działań niepożądanych przerwać stosowanie żelu i skonsultować się z lekarzem.