

Viola Szybki test na Chłamydię, 1 sztuka

Cena: 89,90 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Viola Szybki test do samokontroli na bakterię *Chlamydia trachomatis*. Bakteria *Chlamydia trachomatis* rozprzestrzenia się poprzez seks waginalny, oralny oraz analny.

Chlamydiaza czyli choroba wywołana przez *Chłamydię trachomatis* jest uważana za jedną z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową na świecie.

Zastosowanie

- Mężczyźni lub kobiety z objawami, które mogą wskazywać na infekcję.
- Partnerzy seksualni osób z potwierdzoną lub podejrzaną chłamydią.
- Wszystkie aktywne seksualnie osoby w wieku poniżej 25 lat, corocznie lub częściej, jeśli zmieniły partnera
- Osoby poniżej 25 roku życia, które były leczone z powodu chłamydii w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Osoby, które miały co najmniej dwóch partnerów seksualnych w ciągu ostatniego roku.
- Wszystkie kobiety zgłaszające się do przerwania ciąży.
- Wszyscy zgłaszający się do wenerologa lub ginekologa z objawami wskazującymi na zakażenie
- Matki niemowląt z zakażeniem chłamydiami (np. noworodkowe zapalenie spojówek lub zapalenie płuc).
- Kobiety, które mają zostać wyposażone w antykoncepcję wewnątrzmaciczną (IUCD) lub system domaciczny (IUS), które zostały zidentyfikowane jako zagrożone chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Sposób użycia

Badanie pod kątem zakażenia *Chłamydią trachomatis* przeprowadza się za pomocą wacika dołączonego do zestawu testowego w drogach rodnych kobiety (pochwie).

- Zanurz wacik zawierający próbkę do butelki, tak aby dotknął dna, obracaj wacik w roztworze i naciśnij go kilka razy o ścianki butelki, aby upewnić się z roztworem buforowym.
- Odczekać 5 minut. Podczas oczekiwania wacik musi pozostać w butelce.
- Usunąć wacik wymazowy z butelki, zamknij butelkę z próbką i raz jeszcze potrząśnij nią lekko. Naciśnij górną nasadkę nakrętki i

odłam końcówkę.

- Umieść 2 krople w polu S w kasetce testowej.
- Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:

- urządzenie testujące- kasetka,
- butelka na próbkę
- wacik wymazowy
- instrukcję w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Oznaczony znakiem CE 0483 zgodnie z dyrektywą IVD 98/97/EC dotyczącą wyrobów medycznych.

Galeria

