

# Viscoplast Opti-plast junior, plastry okulistyczne do korekcji wad wzroku 62 x 50 mm 10 sztuk



Cena: 19,95 zł

## Opis słownikowy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Opakowanie  | 10 sztuk            |
| Postać      | plaster             |
| Producent   | 3M VISCOPLAST S.A.  |
| Rejestracja | wyrób medyczny inny |

## Opis produktu

### Wskazania

hipoalergiczne, pozwalają skórze oddychać

### Stosowanie

Sposób użycia:

Zakładanie plastra:

1. Skórę wokół oka umyć i osuszyć.
2. Usunąć papier zabezpieczający plaster.
3. Lekko przymknąć oczy, uważając, aby nie napinać mięśni. Nie zaciskać oczu.
4. Przyłożyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa i rozpocząć przylepianie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.
5. Po umiejscowieniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepioną wokół oka.
6. Zaleca się zmieniać plaster po jego zabrudzeniu lub samoczynnym odklejeniu się.
7. Na noc plaster należy zdejmować.

Zdejmowanie plastra:

1. Delikatnie odklejać plaster od strony nosa w kierunku ucha, jednocześnie przytrzymując skórę w wewnętrznej okolicy oka (bliżej nosa).
2. Jeżeli plaster mocno przylega do skóry, można użyć środka medycznego, ułatwiającego usuwanie opatrunku albo kremu nawilżającego (dopuszczonego do stosowania w okolicy oczu) w celu zmiękczenia warstwy klejącej na krawędzi.
3. Po usunięciu plastra należy przez chwilę przytrzymać palcami świeżo odsłoniętą skórę.

Przeciwwskazania:

- Przestrzegaj zaleceń medycznych związanych z użytkowaniem plastrów okulistycznych 3M Opti-plast.

- Produkt użyty ponownie nie posiada deklarowanych właściwości i nie osiąga zamierzonego działania.

**Ważne**

62 x 50 mm

**Opis**

Viscoplast Opti-plast junior Plastry okulistyczne do korekcji wad wzroku 62 x 50 mm 10 sztuk