

## Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml



Cena: 54,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	38 ml
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Wartix, środek do wymrażania kurzajek (brodawek). Bezboleśnie usuwa kurzajkę wymrażając jej rdzeń.

#### Wskazania

Usuwanie kurzajek ze stóp i dłoni w warunkach domowych.

#### Przeciwwskazania

Uczulenie na zimno.

Dzieci poniżej 4 lat.

Podrażnienie, zapalenie skóry.

Nie stosować na delikatną skórę twarzy, szyi, pach, piersi, pośladków.

Nie stosować na znamiona, pieprzyki i inne zmiany skórne oraz na narządach płciowych.

Cukrzyca.

Zaburzenia krążenia.

Nie stosować w skojarzeniu z inną metodą leczenia kurzajek.

#### Działania niepożądane

W miejscu zastosowania preparatu może dojść do przejściowego zmniejszenia pigmentacji - białe plamki.

#### Stosowanie

- Zwrócić kurzajkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora skierowanego pionowo ku dołowi.
- Przyłożyć aplikator tak, by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki.
- Trzykrotnie przycisnąć dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający.
- Przytrzymać aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund.
- Zdjąć aplikator z kurzajki.

- W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.