

Windi kateter rektalny dla niemowląt, 10 sztuk



Cena: 35,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 sztuk
Producent	SKANDPROJEKT S.C.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Windi kateter rektalny od pierwszych dni życia. Produkt szwedzi do bezpiecznego uwalniania gazów. Przynosi ulgę przy gazach i kolce. Produkt ma postać rurki za pomocą której drogą naturalną, natychmiast i bezpiecznie uchodzą gazy.

Zastosowanie

Gazy i kolka u niemowląt.

Sposób użycia

- Kierując się do dołu delikatnie rozmasuj brzuszek dziecka.
- Natłuść końcówkę przyrządu Windi (może być olej kokosowy lub inny lubrykant).
- Połóż pod pupę dziecka pieluszkę.
- Unieś nóżki dziecka i delikatnie wprowadź końcówkę Windi do odbytu i odczekaj kilka sekund. Po uwolnieniu gazów wyjmij i wyrzuć zużyty kateter.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nigdy nie zostawiaj Windi w odbycie dziecka. Jeśli poczujesz opór, wycofaj rurkę i ostrożnie ją wyjmij. Zawsze wyrzucaj po użyciu. Ponowne wykorzystanie może spowodować infekcję.
- Nie używaj Windi częściej niż 3 x na dobę.
- W razie nie ustępowania objawów skontaktuj się z pediatrą lub położną.
- W razie zaczerwienienia, podrażnienia lub krwawienia przed, w trakcie lub po zastosowaniu Windi skonsultuj się z lekarzem gdyż mogą to być objawy pogorszenia stanu zdrowia.