

Wortie, preparat do usuwania brodawek i kurzajek, 50ml



Cena: 41,00 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Opakowanie	50 ml
Producent	VITAMED
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Preparat Wortie precyzyjnie zamroza kurzajkę lub brodawkę stóp do korzenia. Działa szybko i jest łatwy w użyciu. Nie uszkadza skóry wokół brodawki. Odpowiedni dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych. Tylko do użytku zewnętrznego.

Składniki

Eter dimetylowy

Stosowanie

Brodawki zwykłe (kurzajki):

- postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę,

-trzymając pojemnik w pozycji pionowej; nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki znalazł się nad symbolem zamrażania,

- następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słyszalny dźwięk aktywacji (syk),
- zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do kurzajki (brodawki zwykłej na dłoni) na 20 sekund.

Brodawki podeszwowe (stóp):

- postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę,
- trzymając pojemnik w pozycji pionowej; nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki znalazł się nad symbolem zamrażania,
- następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słyszalny dźwięk aktywacji (syk),
- zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do brodawki podeszwowej (na stopie) na 40 sekund.

Uwaga: skóra może przejściowo zmienić kolor na biały

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki załączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne

- należy przestrzegać podanego czasu stosowania (20 sekund dla kurzajki / 40 sekund dla brodawki stóp), aby uniknąć miejscowego uszkodzenia tkanek,
- pęcherze powstałe po leczeniu większych lub bardziej uporczywych brodawek mogą być bardziej dolegliwe,
- w miejscu usunięcia brodawki może dojść do odbarwienia skóry lub powstania niewielkiej blizny,
- w wyniku zastosowania preparatów do krioterapii brodawek może dojść do niewielkich oparzeń spowodowanych niską temperaturą zamrażania. W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie stosować preparatu Wortie:

- u dzieci poniżej 4. roku życia,
- w obszarze lub w pobliżu twarzy, dołu pachowego, piersi, pośladków ani okolic narządów płciowych,
- w leczeniu znamion wrodzonych, pieprzyków, brodawek, z których wyrastają włosy ani żadnych innych zmian o charakterze plam,
- na obszarach skóry wrażliwej, objętej stanem zapalnym, uszkodzonej, zranionej, otartej, zmienionej chorobowo lub swędzącej,
- w przypadku wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest brodawką zwykłą (kurzajką) czy brodawką stóp, należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić przed światłem słonecznym i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni - palenie wzbronione

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 C/122 F.

Unikać kontaktu z oczami.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.